
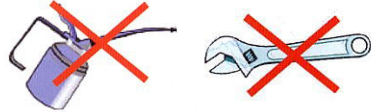





# Montageanleitung Druckminderer

|  |  |  |
|--|--|--|
|   |   |   |
|   |    |   |
| <p><b>1. Schritt:</b></p>  | <p><b>2. Schritt:</b></p>  | <p><b>3. Schritt</b></p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernen Sie bitte die Schutzkappe von der Sauerstoff-Flasche.</li> <li>- Schrauben Sie den Druckminderer handfest an die Sauerstoff-Flasche<br/><b>Bitte nie mit einem Werkzeug anziehen!</b></li> </ul> <p>(WICHTIG: Sicherheitshinweise beachten)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum Öffnen der Sauerstoff-Flasche drehen Sie das Flaschenventil in Pfeilrichtung (gegen den Uhrzeiger-Sinn) auf! Höchstens eine Umdrehung, nicht weiter!</li> <li>- Mit Hilfe des Manometers den Fülldruck der Sauerstoff-Flasche kontrollieren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Hilfe des Flow-Handrades die Sauerstoffzufuhr regeln. (l/min)</li> <li>- Die Nasenbrille (bzw. Maske) bei Punkt A mit dem Druckminderer verbinden.</li> </ul> |
| <p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Halten Sie Ihr Sauerstoffgerät frei von Öl und Fett! Am besten waschen Sie sich vor jeder Benutzung die Hände!</li> <li>- Rauchen oder offenes Feuer in der Nähe Ihres Sauerstoffgerätes ist streng verboten.</li> <li>- Reinigen Sie Ihr Sauerstoffgerät immer nur außen, nie im Inneren! Nehmen Sie dafür ein sauberes Tuch, das trocken oder mit sauberem Wasser befeuchtet sein darf! Wenn Sie Desinfektionsmittel benutzen, achten Sie unbedingt darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Druckminderers eindringt!</li> </ul> |  |  |

# De-Montageanleitung Druckminderer

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |    |    |
|   |   |    |
| <p><b>1. Schritt:</b></p>  | <p><b>2. Schritt:</b></p>   | <p><b>3. Schritt</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schließen Sie zunächst bitte die Sauerstoff-Flasche. Dazu drehen Sie das Flaschenventil in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trotz geschlossener Flasche erzeugt der Sauerstoff im Druckminderer noch einen gewissen Rest-Druck. Dieser Rest-Druck wird auch auf dem Manometer angezeigt!</li> <li>- Lassen Sie den restlichen Sauerstoff aus dem Druckminderer entweichen (entweder, indem Sie den Sauerstoff vollständig entnehmen, oder indem Sie den Druckminderer auf die höchste Stufe stellen, bis kein Sauerstoff mehr entweicht).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobald das Manometer keinen Druck mehr anzeigt (Zeiger steht auf Null), können Sie den Druckminderer von der Sauerstoff-Flasche <b>mit der Hand (!!)</b> abschrauben.</li> </ul> |
| <p><b>Hinweise:</b><br/>Bitte benutzen Sie niemals ein Werkzeug bzw. öl- oder fetthaltige Hilfsmittel, um den Druckminderer abzuschrauben!</p>                                   |   |   |